


Démarrage du logiciel sous MAC OS®X

Nous vous expliquons ci-dessous, pas à pas, comment démarrer et utiliser votre CONTOUR® NEXT USB personnel sur le système d'exploitation de votre choix.


Étape 1. Enfichez votre CONTOUR® NEXT USB dans un port USB disponible.




Apparaissent sur votre bureau le lecteur virtuel "Glucofacts".

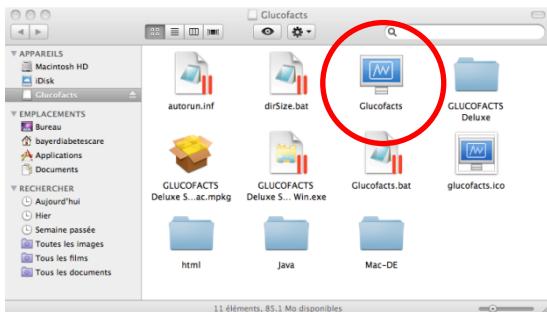

Double-cliquez sur le dossier "Glucofacts".

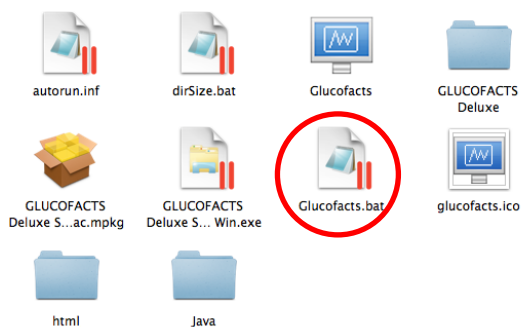

Dans le dossier Glucofacts, cliquez sur "Glucofacts.bat". Le démarrage du logiciel peut prendre quelques minutes.

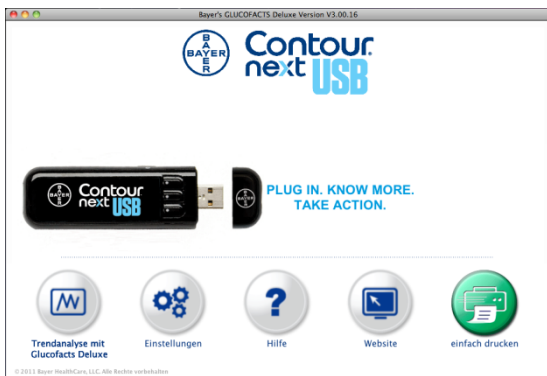

Le logiciel GLUCOFACTS®Deluxe s'ouvre.

Si le logiciel GLUCOFACTS® Deluxe ne s'ouvre pas de cette manière, prière de suivre le mode d'emploi




Si le logiciel GLUCOFACTS® Deluxe ne s'ouvre pas de cette manière, téléchargez le dernier pilote Java sur votre MAC via "Mise à jour de logiciels".

Pour ce faire, cliquez sur Pomme -> Préférences Système -> Mise à jour de logiciels.


Après avoir installé Java, placez la dernière version tout en haut dans votre programme de service Java.

Pour ce faire, cliquez sur Finder -> Programmes -> Programmes de service -> Paramètres Java.

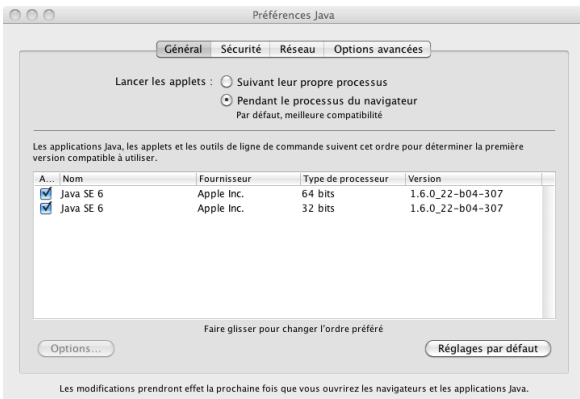

Retournez maintenant sur le bureau de votre MAC et démarrez le programme selon le mode d'emploi, **Étape 1.**

Étape 2. Pour quitter le logiciel GLUCOFACTS® Deluxe, procédez comme suit: cliquez sur le bouton X rond en haut à droite.

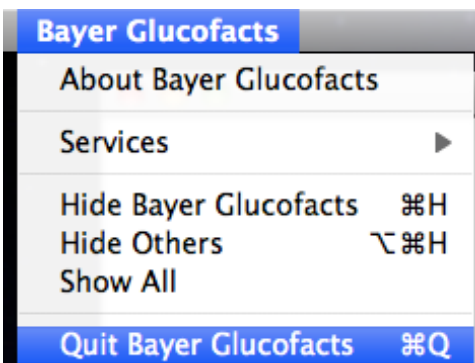

Quitter ensuite complètement le logiciel via le symbole "écran" sur votre écran.